

Dossier patient - antériorité et comparaison d'examens



Clic droit sur une image pour accéder à toutes les fonctionnalités de SYNAPSE

Manipulation des images

Défilement des outils : Fenêtrage, Zoom et Déplacement	CLIC GCHÉ MAINTENU + CLIC DROIT
Défilement des images	MOLETTE SOURIS
Défilement rapide des images (Mode ciné)	CLIC MOLETTE + SOURIS
Modification du format de découpe	CTRL + MOLETTE SOURIS
Afficher une image en plein écran depuis le format planche	DOUBLE CLIC SUR L'IMAGE
Repérage interactif orthogonal (IntelliLink)	I + CLIC GAUCHE DANS L'IMAGE
Défilement par quadrants mammaires.	TOUCHE «Q» DU CLAVIER

Mesures

Mesurer une distance (Règle)	R+ CLIC GAUCHE
Mesurer un angle	G+ CLIC GAUCHE
Densité dans une région d'intérêt (ROI elliptique)	E+ CLIC GAUCHE

Divers

Sélection image pertinente (Marquer l'image)	B + CLIC SUR L'IMAGE
Réinitialise les paramètres d'affichage de l'examen	F5
Réinitialise le fenêtrage	9
Préréglages de fenêtrage (Presets)	PAVE NUMERIQUE DE 0 A 9
Insérer du texte	T+ CLIC GAUCHE
Loupe (Roi Interactive)	O+ CLIC GAUCHE
Reconstructions MPR-MIP	M+ CLIC GAUCHE

Comparaison d'examens

Comparaison automatique de l'examen de même modalité, le plus proche chronologiquement de celui qui est affiché.	ALT + C
Arrêter une comparaison	ALT + X
Synchroniser manuellement des examens de dates différentes chez un même patient	K + CLIC SUR LES SERIES A SYNCHRONISER